



# PENTAMIX 3

## lenyomat-keverőgép akció



**Amennyiben vásárol egy Pentamix 3 lenyomat-keverőgéphez való bármilyen Impregum Penta bevezető készletet, majd havonta 1 doboz bármilyen Impregum Penta utántöltőt 12 hónapig és 6 doboz Penta csórt, a Pentamix 3 keverőgépet az első rendelésnél ajándékba kapja. (Az anyagokat egyszerre is megvásárolhatja.)**

- A Pentamix 3 lenyomatanyag - keverőgép teljesen homogén, csúcsmínőségű lenyomatanyag keveréket biztosít a nagypontosságú lenyomatokhoz és a tökéletes széli záródású pótlásokhoz
- Lehetővé válik a több csontos rögzített pótlások egyidejű lenyomatvétele, mivel hosszszab intraorális fecskendezési idő áll rendelkezésre
- Kétszer gyorsabb keverési, adagolási idő a Pentamix 2 keverőgéphez képest
- Kisebb helyigény, nagyobb munkafelület
- Az ergonomikus dizájnak köszönhetően jobb és balkezesek is könnyen működtethetik
- A megnövelt teljesítmény csak az eredeti Penta 3

anyagoknál érhető el, de a gép hagyományos keverési gyorsaságot biztosít más gépi keverési lenyomatanyagok számára is

Az akció visszavonásig érvényes, részleteiről, érdeklődjön kereskedőjénél vagy a 3M ESPE Területi Képviseleténél!

**Nagy Szilárd • 3M ESPE Területi Képviseelő**  
**06-30-414-2008**

**Marton Rita • 3M ESPE Területi Képviseelő**  
**06-20-377-4012**

**3M ESPE**

## Tippek, trükkök a sikeres lenyomatvételhez

**Megjelenés:** Szakadás, betépődés a preparációs széleken

**Eredmény:** Rövid koronák és/vagy széli záródási rések

Ok	Megoldás
Nem megfelelő nyiretrakció	Szeperálja el az ínyt, úgy, hogy a lenyomatanyagnak legyen helye befolyni a preparációs szélekhez! Használjon „kétfonalas technikát”-t! Hagyja bent a sulcusban az első retrakciós fonalat és győződjön meg róla, hogy az sehol sem takarja a preparációs felszínt!
Szakadékony a lenyomatanyag	Használjon erősebb anyagot!
<b>Poliéter anyagok:</b> A lenyomatanyag nem köt meg a savas retrakciós anyagok/ hemosztatikumok (alumínium és vas sók) miatt	Használjon pH 4-nél lúgosabb anyagokat! Válasszon adrenalin és vas só mentes retrakciós fonalat, valamint hemosztatikumot! Öblítse le hemosztatikumot vízzel és exhaustorral! Szárítsa le megfelelően a preparációs felszíneket!
<b>Vinil-polsziloxszán anyagok:</b> A lenyomatanyag nem köt meg kénnel való érintkezés miatt (Latex kesztyű, szövetek, fog, retrakciós anyag, vagy más lenyomatanyag)	Használjon olyan kesztyűt, amely nyomokban sem tartalmaz kénvegyületeket! Ha „kénfertőzés” gyanúja áll fenn, távolítsa el a kénnyomokat higított hidrogén-peroxiddal!
„Smear-layer” az ideiglenes koronából, cementmaradványok, vagy csonkfelépítés található	Az ideiglenes koronát, hidat csak a végleges precíziós lenyomat levétele után készítse el! Távolítsa el a felesleges szennyeződést alkoholos, vagy benzines vattával! Ne használja az ideiglenes koronához, hídhoz használt lenyomatot a végleges lenyomathoz!
Lenyomat korai eltávolítása	Ellenőrizze, hogy a lenyomatanyag megkötött! Kövesse a gyártó utasításait a kötési idő tekintetében!
Nem megfelelő keveredés	Biztosítson száraz környezetet! Használja az előírt keverőcsőrt! Győződjön meg róla, hogy betartotta a használati utasítást, és a lenyomatanyag is homogén, „csíkmentes”!
Lejárt szavatosságú anyag	Csak a szavatossági időn belül lévő lenyomatanyagot használjon!



**3M ESPE**