

## REAL BLEACH 20%

### Professzionális fogfehérítő rendszer

#### Használati utasítás fogorvosoknak

REALBLEACH 20% egy 20% karbamidperoxid tartalmú, önaktíváló fehérítő zselé, 8ml-es 10:1 keverésű fecskendőben.

**Összetétel:** Carbamidperoxid, Glycerin, Activator

**Indikációk:** A RealBleach elszíneződött fogak fehérítésére alkalmas, amennyiben az elszíneződés a következők miatt lépett fel:

- Öregedésből származó elszíneződések
- Ételektől származó elszíneződések (kávé, tea, cigaretta, vörösbőr stb.)
- Gyógyszertől származó elszíneződések (pl. Tetrazyklin)
- Zománcelszíneződés fluorozis következtében.
- Fogelhalás

**Kontraindikációk:** A RealBleach-et ne használja:

- Terhesség és szoptatás ideje alatt
- Az összetevőkkel szemben fennálló allergia esetén
- Erős dohányosoknál, amennyiben a kezelés ideje alatt nem hagy fel a dohányzással.
- Szabadon fekvő fognyakaknál
- Koronáknál és hidaknál szabad szélekkel
- Ellátatlan fogszuvasodásnál

#### Figyelem!:

- Carbamidperoxid bőrrel, nyálkahártyával vagy szemmel érintkezve marást okozhat. Érintkezéskor sok vízzel mossa le, szembe kerülés esetén konzultáljon szemésszel is.
- Ne nyelje le (gyomorégést okoz)
- Tartsa távol gyerekektől!

#### Utasítások/Óvatossági intézkedések:

A fogak és fogíny érzékenyen reagálhatnak, ebben az esetben kevesebb zselét vigyen fel és/vagy rövidítse le a behatási időt. Amennyiben ez nem segít, vizsgálja meg, hogy nem áll-e fenn allergia, és szakítsa meg a kezelést.

#### A kezelés előkészítése:

- Tájékoztassa a páciens. Mondja el a lehetőségeket, a lehetséges kockázatokat és mellékhatásokat, illetve a kezelés tényleges menetét.
- Derítse ki az elszíneződés okát, mutassa be az előrelátható végeredményt
- A fehérítendő fog előkészítése (professzionális fogtisztítás, színmeghatározás (fényképkészítés) a felszíni anomáliák eltávolítása

#### A kezelés:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a fogakat alaposan megtisztította.
- A gingiva védelme érdekében vigye fel aRealBleach Mask anyagot (ld. RealBleach Mask használati utasítás). Alternatívaként kofferdamot is használhat.
- A RealBleach-et közvetlenül vigye fel a fogakra a keverőcsőr segítségével. A keverőcsőrből először kijövő átlátszó anyagot dobja el. Az anyagot csak akkor kezdje el felvinni a fogra, amennyiben az anyag már sárga színű. A hatás javítása érdekében az anyagot a fogfelszínre egy fogkefével bele is masszírozhatja.
- Kb. 10perc behatási idő után távolítsa el a zselét egy gézdarab vagy egy kefe segítségével. Majd bő vízzel öblítse le.
- A RealBleach Mask, illetve a kofferdam eltávolítása után polírozza át a fogakat.
- Szükség esetén reminalizálja a fogakat fluoridtartalmú zselével.
- Minden újabb applikálás esetén új keverőcsőrt használjon, mivel a használt keverőcsőrön belül az anyagok kapcsolatba lépnek és így később már nem fejtik ki fehérítő hatásukat.

A kezelést megismételheti, ha a végeredmény még nem érte el a kívánt világosságot.

Érzékeny páciens esetén rövidítse le a kezelési időt.

A kezelés ideje alatt folyamatosan ellenőrizze a fehérítendő fogakat és a gingiva állapotát.

#### Tárolás:

A RealBleach anyagot **hűtőben** 2-8 °C között tárolja (ne tegye a mélyhűtőbe, napfénytől és hőtől védje).