

## Realcem Provi

### Eugenolmentes cement ideiglenes hidakhoz és koronákhoz minimix kartusban

A Realcem Provi automatikusan keverhető eugenolmentes ideiglenes cementanyag mind ideiglenes koronákhoz és hidakhoz mind pedig tartós restaurációk ideiglenes rögzítéséhez. Az ideiglenes híd és koronaanyagon a kötés kiváló, eltávolítása a fogcsonkokról igen könnyű. Minimix kiszerezéséből adódóan az anyag használata nagyon egyszerű és kényelmes. Eugenolmentes formulájának köszönhetően az anyag semmi esetre sem befolyásolja az ideiglenes koronák és hidak későbbi polimerizálódását, valamint a tömésekhez használatos kompozitcementek és kompozitok polimerizálódását sem. Az ideiglenes korona és híd cement cinkoxid és szerves savak bázisára épül. Különösképpen allergiás esetekben az anyag használata igen célszerű.

Megfelel a DIN EN ISO 3107 előírásainak és az ADA/ANSI minőségi és kiviteli anyagoknak.

#### **Felhasználás**

##### **MINIMIX fecskendő előkészítése**

Távolítsa el a Minimix fecskendő zárókupakját / melyet dobjon el, ne használja újra / és helyezze be a speciális 1:1 arányú keverőcsőrt. A keverőcsőrt 90°-os oldalirányban fordítsa el, s rögzítse. Az anyagot közvetlenül a keverőcsőrből adagolhatja.

##### **Megjegyzés:**

A keverőcsőr arra szolgál, hogy lezárva tartsa a kartust, amíg azt újból nem használjuk. Az első 2-3 mmnyi kinyomott anyagot dobja el. Ez minden új alkalmazásra érvényes.

##### **Applikáció**

Az anyag könnyed nyomás hatására közvetlenül applikálható a keverőcsőrből az ideiglenes koronákba vagy hidakba. Kis mennyiségben, vékony rétegben visszük fel a cementet az ideiglenesen rögzítendő koronák és hidak belső oldalára, melyet legkésőbb 1,5 perc alatt óvatosan könnyed, aztán majd erőteljesebb nyomással a preparált csonkra helyezzünk.

##### **Információ:**

**A csonk környezetét ne előtte szárítsuk le, hanem inkább kevés vízzel tartsuk nedvesen. A nedves csonk elősegíti, az ideiglenes korona vagy híd későbbiekben történő könnyed eltávolítását.**

Az anyag 2-3 percen belül szájban megkeményedik. A polimerizáció után a felesleget el lehet távolítani.

#### **Fontos tudnivalók**

- Ne használja azon betegek esetében, akik allergiásak az anyagra
- Bőrrel való érintkezéskor vagy szembe kerülés esetén vízzel öblítsen.

- Lenyeléskor azonnal forduljon orvoshoz.

##### **Tárolási feltételek**

8-25 C között tárolandó. A szavatossági idő lejártá után ne használja.