

## REALETCH GEL 37%

A REALETCH GEL egy nagyon **thixotrope savazó zselé, 37% Orthophosphor-savat** tartalmaz.

2 vagy 5 ml-es fecskendőben szállítható, melynek nagyon vékony applikációs tűje egyszerű és biztos applikálást tesz lehetővé minden olyan helyre, ahol savazás szükséges.

### A REALETCH GEL-fecskendő előkészítése

Távolítsa el a zárókupakot és helyezze fel az applikációs tűt.

**Figyelem:**

Az applikációs tű könnyen hajlítható, annak érdekében, hogy megkönnyítse az applikálást.

**Óvatossági intézkedések a használat során:**

Az első kis cseppet keverőblokkra nyomja ki, annak érdekében, hogy a légbuborék záródást elkerülje és ezáltal biztosítsa a biztonságos felhasználást.

### A REALETCH GEL applikálása

Vigye fel a REALETCH GEL-t a zománcre és a dentinre, kezdve a zománcéleknél és **20 másodpercig** hagyja hatni. Tejfogak vagy magas fluoridtartalmú fogak esetében a savazási idő **60 másodperc**. Végezetül 20 másodpercen keresztül vízzel öblítse le, majd víz-, és olajmentes levegővel szárítsa meg. A dentint ne szárítsa túlságosan ki, mert egy enyhén nedves dentinfelület a később behelyezett ragasztórendszer felhasználásához lényeges. A savazott zománcszél krétafehér színű legyen.

**Óvatossági intézkedések a savazásnál:**

Fontos, hogy a kész savazott felületet ne szennyezzük be. Szennyeződés esetén a fentiekben leírt savazási folyamatot meg kell ismételni. Kerülje a savazó gél bőrrel, nyálkahártyával vagy szemmel való érintkezését. Érintkezés esetén bő vízzel öblítse le.

### Adhezív applikálása

A megfelelő adhezívet (pl. REALBOND ETHANOL) ecset segítségével vigye fel a gyártó előírásainak megfelelően a savazott, szennyeződésmentes zománc-, és dentinfelületre.

### Restauráció készítés, polimerizálás és finírozás

A gyártó megfelelő használati utasítását vegye figyelembe.

### Tárolás

Ne tárolja 25°C fölött.